



2023年
災害安全製品に選定
Nurugo L330



AED & CPR の教育装備

CPR is an act of love to save lives and
best CPR, Inc. is Korea's best company in terms of
emergency medical equipment working with
those who protect human lives. We are always
putting forth our best effort to develop high quality
CPR training and emergency medical equipment to
Protect precious human lives.



Contents

4

企業の紹介

About Us

6

納品事例

References

7

心肺蘇生法

CPR

8

教育用
体外式除細動器

R-ligo

10

心肺蘇生訓練用
マネキン

Nurugo

14

CPR先生

CPR SAM

15

ブランドチャンネル

Brand Channels

A company that spreads love through CPR,
specializing in the best training equipment in Korea



CPR Total Solution

健全な社会と国民の健康を守り、CPRを通じて愛を実践する企業、
韓国最高の教育機器専門会社「株式会社ベストCPR」です。
かけがえない命を常にそばで守り、
緊急医療体制の確立のために、
今日も当社は最善を尽くしています。



会社紹介

沿革

2007	06 (株)CUネットワークスを設立
2008	02 仁川国際空港にAED33台を供給
2009	05 韓国鉄道公社およびKTXにAED189台を供給 05 政府総合庁舎(果川市および大田市)にAEDを供給 10 ベンチャー企業の登録
2010	11 KTX新規開通駅舎にAEDを供給 11 G20ソウル・サミットにAEDを協賛
2011	11 キャノンコリア・ビジネスソリューションとMOUを締結
2012	11 LGU+に自動体外式除細動器1,000台を供給 12 訓練用自動体外式除細動器「LifeOn-100」を発売 12 韓国海洋救助協会とMOUを締結
2013	02 済州特別自治道に自動体外式除細動器780台を供給 05 韓国GMに自動体外式除細動器を供給 12 ソウル特別市に自動体外式除細動器1,600台を供給
2014	01 大邱広域市教育庁に自動体外式除細動器51台を供給 03 心肺蘇生教育機関の認証を取得(大韓心肺蘇生協会) 05 現代自動車、起亜自動車にAEDを供給 11 2014年 韓国優秀特許大賞を受賞 (生命工学/化学分野・訓練用の除細動システム、韓国日報)
2015	02 学校優秀製品の認証(LifeOn) 03 訓練用の自動体外式除細動器「R-ligo」を発売 03 陸軍1266部隊に自動体外式除細動器544台を供給 06 企業附属研究所「ベストCPRラボ」を設立 09 心肺蘇生訓練用マネキン「Nurugo」を発売 12 韓国デザイン振興協会より「R-ligo」が優秀デザインに選定
2016	08 韓国プロサッカー連盟にて心肺蘇生教育を実施 08 社名を「株式会社ベストCPR」に変更し、本社を移転 11 技術革新型中小企業(イノビス認証) 12 仁川広域市教育庁に心臓除細動器418台を供給
2017	01 ISO 9001:2008 / KS Q ISO 9001:2009を取得 04 心肺蘇生教育用のトレーニングベッドを発売 04 心肺蘇生教育用のマネキン「Nurugo」が調達庁のベンチャー創業革新調達商品に指定 05 江原消防本部に心肺蘇生教育用マネキン「Nurugo」500台を供給 07 仁川広域市教育庁に心臓除細動器418台を供給 09 仁川広域市教育庁に心臓除細動器418台を供給
2018	01 ISO 9001:2015 / KS Q ISO 9001:2015の認証 01 大韓心肺蘇生協会のトレーニングサイト「LifeOn教育センター」を開設 01 仁川国際空港の第2旅客ターミナルに自動体外式除細動器(AED)を納品 01 大韓赤十字社の京畿道支社と社会貢献協約 02 2018日本大阪での国際医療エキスポ(Medical Japan 2018 OSAKA)に参加

2018	03 KIMES 2018(第34回国際医療機器・病院設備展示会)に参加 05 LifeOn教育センター、BLS専門教育機関(KACPR)の認証 07 KISS 2018国際安全保健展示会(COEX)に参加 09 G-FAIR KOREA(KOREA SOURCING FAIR in DUBAI)に参加 11 第5回 韓国安全産業博覧会 K-SAFETY(KINTEX)に参加 12 2018年下半年「輸出有望中小企業」に選定 (中小ベンチャー企業部)
2019	02 仁川消防本部 / 慶南教育庁に「Nurugo」を納品 03 海外調達市場進出有望企業(G-PASS企業)に指定 04 台湾・シンガポールに輸出 05 京畿道安全本部に「Nurugo」を納品 06 済州道教育庁に「Nurugo」と「R-ligo」728台を納品 07 日本・ベトナム・インドに輸出 08 2019年、第4次海外支社化事業に選定 09 ベトナムのSECUTECH(防犯・消防安全展示会 / ホーチミン市)に参加 09 城南市医療観光博覧会に参加(城南市庁)、カンボジア・シンガポールに輸出 09 K-SAFETY EXPO 2019に参加 10 京畿赤十字社の心肺蘇生競技大会にマネキンを寄贈および行事に参加 12 大韓赤十字社の「正しく支出する企業」に選定
2020	06 心肺蘇生訓練用マネキンの中国特許登録 07 行政安全部、2020年の第1次災難安全製品認証を取得 (第CDSP-2020-3号) 08 ヨーロッパ特許の登録
2021	01 大韓赤十字社、2020年約定寄付金を寄託 01 手指消毒機「ベストショット」を発売 03 心肺蘇生訓練用マネキンのドイツ特許登録 (602016051197.5) 07 本社および工場を京畿道金浦市長岐洞へ移転 11 未来成果共有企業の確認 12 金浦アイサランセンターに寄付
2022	02 大韓赤十字社ソウル支社に2021年約定寄付金を寄託 02 大韓赤十字社京畿支社に2021年約定寄付金を寄託 03 「R-ligo T200A」を発売
2023	05 心肺蘇生訓練用マネキンの韓国特許登録(第10-2531834号) 09 心肺蘇生教育用トレーニングベッドのキオスク型モデルを発売 09 心肺蘇生訓練用マネキン保管バッグの韓国デザイン登録 (第30-1230719号) 10 「Nurugo L380B」(L380、L360B、L360)の海外規格認証 (CE、RoHS、FCC、JMIC)を取得
2024	02 大韓赤十字社の京畿支社に6年連続で販売収益金を寄付 07 「Nurugo」マネキン L360、L380がベンチャーナラに登録 08 マルチメディア学習装置の直接生産登録 12 「Nurugo L390B」が調達革新製品に指定
2025	02 サムスン電子と心肺蘇生教育ブースの納品およびメンテナンス契約 05 企業附属研究所を東灘に移転

工場


- ・京畿道金浦市テジャン路、741キョンドンミルウェルシティ(場基洞)所在
- ・R-ligo AEDトレーナー」と「Nurugo CPRマネキン」および手指消毒機、CPRのトレーニングベッド(キオスク型)を製造・生産
- ・韓国内での研究・開発・製造を通じ、高品質の製品をリーズナブルな価格で供給
- ・ベストCPRの企業附属研究所にて製品の耐久性および安全性について事前テストを実施(100万回以上)
- ・国家公認試験機関での耐久性評価済み、中小ベンチャー企業部の性能認証(EPC)済み
- ・調達庁の革新製品に指定(Nurugo L390B)および試験購入製品の確認(Nurugo L330)



認証の状況




ベンチャー企業の確認書

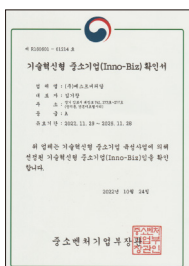

技術革新型中小企業の確認書




ISO9001の認証書

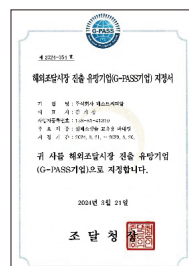


G-pass企業の指定書




著作権登録証

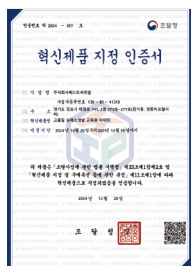

革新製品指定の認証書

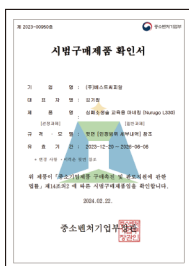


試験購入製品の確認書

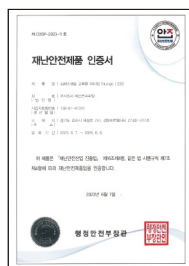

災害安全製品の認証書



特許証(中国)

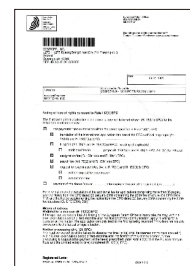

特許証(ヨーロッパ)



特許証



特許証



特許証



特許証



デザイン登録証



商標登録証




商標登録証



商標登録証




サービスマーク登録証

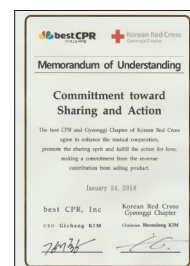

大韓赤十字社との業務協約書

納品事例

韓国内の主要官公庁および企業

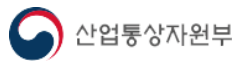

心肺蘇生法 CPR

心肺蘇生法の重要性




しかし、「生存率は？」



<出典:2023年急性心停止統計 / 疾病管理庁 & 消防庁>


一般人の心肺蘇生法の実施率

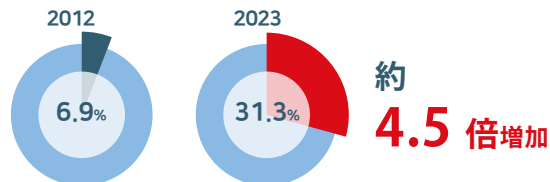

<出典:2023年急性心停止統計 / 疾病管理庁 & 消防庁>

年間33,000人に発生する急性心停止、生存率はどのくらいでしょうか？

<出典:2023年急性心停止統計 / 疾病管理庁 & 消防庁>

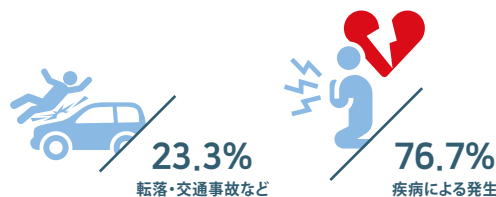

急性心停止患者33,402人のうち、生存者はわずか
2,872人で、生存率は**8.6%**(2023年)

このうち急性心停止患者は、心筋梗塞、不整脈、脳卒中などの
疾病による発生が全体の76.7%を占め、転落・交通事故などの
疾病以外の要因による発生が23.3%であると明らかになった

CPR


- 2023年の急性心停止発生率は、人口10万人あたりに65.7人で、主要がん(2021年基準)よりも多く発生

*出典:2021年 国家がん登録事業 年次報告書(中央がん登録本部)

「周囲で突然発生した心停止患者に、
どのように対応すべきでしょうか？」

1. 構成品

- 肩を軽くたたきながら「大丈夫ですか？」と声をかけて反応を確認します。
- 反応がない場合は、すぐに119に通報するか、周囲の人に助けを求めます。

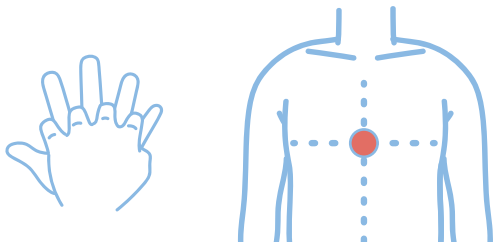

3. 心肺蘇生法の実施


- 患者を硬くて平らな場所に仰向けに寝かせます。
- 指を組んだ両手の手のひらの付け根を胸骨の下半分に位置させます。

5. 人工呼吸を2回行います。

- 患者の頭を反らせて、あご先拳上法で気道を開きます。
- 口を大きく開けて患者の口を完全に塞ぎ、胸が上がる程度に1秒かけて息を吹き込みます。

2. 呼吸の確認

- 患者の胸が上下しているか、呼吸音があるかを10秒以内で確認します。
- 呼吸がない、または異常な場合(浅い呼吸など)、すぐに胸骨圧迫を開始します。

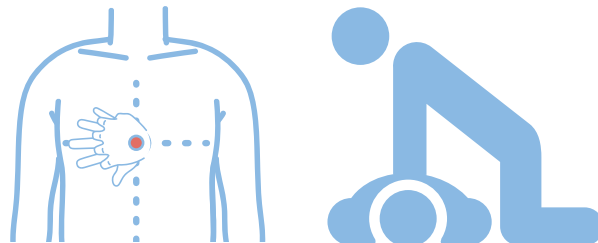

4 胸骨圧迫

- 両腕をまっすぐに伸ばした状態で体重をかけ、患者の体と垂直になるように胸を圧迫します。
- 成人では1分間に100~120回の速度で約5cmの深さで速やかに圧迫します。

Repeat 1-5 times



T200A 教育用自動体外式除細動器

実際と同じ作動法で、正しい自動体外式除細動器を活用する教育を提供します。

製品の名称・説明

1. ハンドル

機器を運ぶための装置です。

2. スピーカー

音声指示文が送出されるスピーカーです。

3. ショックボタン

電気ショックを認可する際に使用されます。

4. ボリューム調節ボタン

装備の音量を5段階に調節することができます。
(Volume 1-2-3-4-5)

5. 一時停止/開始ボタン

進行するシナリオを一時停止/開始します。

6. 電源ボタン

電源のON/OFFに使用します。

7. パッドコネクターの挿入口

教育用パッドのコネクタを接続する挿入口です。

8. メトロノームスイッチ

メトロノームのON/OFFに使用します。

9. Languageボタン

言語選択ボタンを使用し言語を選択します。

10. SELECTボタン

シナリオを選択するボタンです。

11. USB端子

機器とパソコン間でデータを送・受信する端子です。



※ 教育に便利な専用リモコン

製品の特徴



パッド装着位置をLEDで表示



替えパッドを使用

パッドのみ交換が可能で、コストを削減



様々な接続方式を適用

2種類のAEDコネクタ接続方式を適用
(Pre-connected & Non Pre-connected
共用使用)



一時停止及び音量調節機能

一時停止機能 - 教育時に便利に使用が可能
音量調節の機能 - 周辺の騒音に合わせて
音量の調節が可能



多言語対応

6ヶ国語に対応(韓国語/英語/中国語/
日本語/インドネシア/ベトナム)



教育に便利な専用リモコン

進行するシナリオの一時停止/開始可能
機器制御・遠隔制御可能



規格および構成

品名	教育用の自動体外式除細動器		機能	20種類のシナリオと多言語対応の教育用自動体外式除細動器	
シナリオ	S01 心室細動・基本型①			S06 無収縮変化型	
	S02 心室細動・基本型②			S07 Hands-onlyの心室細動	
	S03 心室細動変換型			S08 Hands-onlyの無収縮	
	S04 無収縮・基本型①			S09 拍子機	
	S05 無収縮・基本型②			S10 拍子機 Hands-only	
	S11-S20	S11:1番シナリオでメトロノームをOFF(12番～20番シナリオと同様に適用)			
特徴	20種類のシナリオを提供し、緊急時に迅速に対応可能 - 韓国内の全種類のAEDコネクタ接続方式を適用(Pre-connected & Non Pre-connected 共用使用) 2020年、心肺蘇生法のAHAガイドラインを適用し、最新CPRガイドラインの情報を習得 - 教育時に一時停止機能があり、容易に使用が可能 - 部分交換が可能な教育用パッドで、コストの削減が可能 - 周囲の環境騒音に応じて音量の調整が可能 - 多言語(6カ国語)に対応 - 韓国語／英語／中国語／日本語／インドネシア語／ベトナム語 - 拍子練習機能(メトロノーム)があり、胸骨圧迫の速度を教育することが可能				
外形	横220mm x 縦245mm x 高さ55mm		重量	1.0kg	
定格電圧	フェイスシールド(50枚)				
構成品	本体、教育用パッド、交換用パッド(大人用5枚入)、単3乾電池(4ea)、リモコン、単4乾電池(2ea)、取扱説明書、携帯用バッグ				

*シナリオ「S03」で設定された状態で出荷されます。

消耗品/アクセサリ

※別途購入が可能



教育用AED交換用パッド(5枚入)



(大人用/小児用)

教育用AEDパッド(コネクター付き)



(Adult / Pediatric)

マネクリン



R-ligoの保管バッグ






B100 / L320 / L330 / L380 / L380B 心肺蘇生訓練用のマネキン

人体に似た構造と視覚的、聴覚的フィードバック機能を通じ、心肺蘇生法の教育を効果的に提供します。


製品の名称・説明

※ Nurugoのモデルによって機能が制限される場合があります。

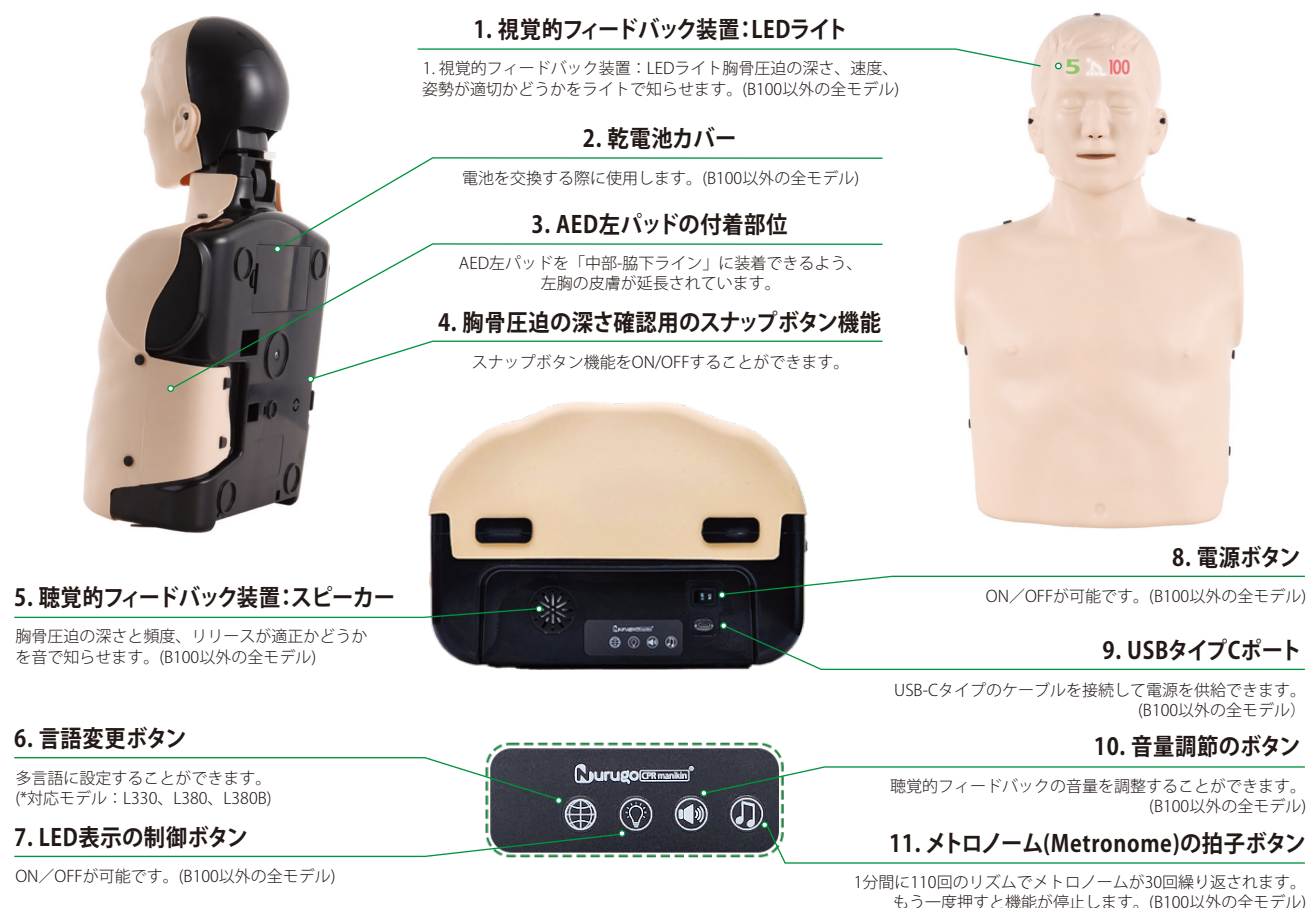

製品の特徴

※ Nurugoのモデルによって機能が制限される場合があります。

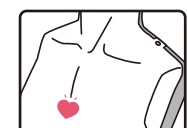

規格および構成

規格	モデル名	重量 (電池は含まれていません)	電源	構成
基本型	B100	3.0kg	-	▪ 半身型心肺蘇生教育用のマネキン ▪ 気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫など大人向けの基本教育機能 ▪ 評価する ▪ 人工呼吸をする時、胸部の上昇が肉眼で確認可能 ▪ 人工呼吸をする時に気道維持及び気道閉鎖が可能 ▪ 口腔対口腔の実習時、鼻を塞がないと鼻から空気が漏れるようになっています。 ▪ 胸圧迫の深さを肉眼と音で確認が可能 ▪ 顔の皮膚および肺のビニール袋を交換することが可能 ▪ 左胸の皮膚が背面まで延長されており、胸骨下の「中部-脇下ライン」にAEDパッドの装着が可能
フィードバック型 (韓国語)	L320	3.5kg	単1形1.5V(4本) または USBタイプCポート (兼用)	▪ 基本B100の機能 ▪ 心肺蘇生法の品質(胸骨圧迫/速度)に対する視覚的フィードバック機能を、LED形態の数字で表示 ▪ 心肺蘇生法の品質(胸圧迫/速度)に対する聴覚的フィードバック機能を、スピーカーを通じて案内 ▪ 胸圧迫時、リリースの有・無の心肺蘇生法を満たしているか、LED&スピーカーを通じて案内
フィードバック型 (多言語)	L330	3.5kg		▪ 基本的なL320の機能 ▪ 10カ国語に対応 - 韓国語／英語／中国語／日本語／インドネシア語／ベトナム語／タイ語／スペイン語／ドイツ語／フランス語
	L380	3.5kg		▪ 基本的なL330の機能 ▪ 胸骨圧迫位置の表示灯を装備し、正確な位置での圧迫が可能 ▪ 垂直圧迫に関する視覚・聴覚的フィードバック機能で、圧迫する姿勢の矯正が可能
	L380B	3.5kg		▪ SAM TS専用製品 ▪ L380の基本機能 ▪ SAM TSとBluetoothで接続し、実行結果をリアルタイムで送信

構成品

区分	モデル名	基本構成品	追加構成品
基本型	B100	本体(1)、顔の皮膚(1)、バッグ(1)、ジャケット(1)、肺ビニール袋(1)、取扱説明書(1)、フェイスシールド(20)	
フィードバック型 (韓国語)	L320	本体(1)、顔の皮膚(1)、バッグ(1)、ジャケット(1)、肺ビニール袋(1)、取扱説明書(1)、フェイスシールド(20)	USBタイプCケーブル(1)
フィードバック型 (多言語)	L330	本体(1)、顔の皮膚(1)、バッグ(1)、ジャケット(1)、肺ビニール袋(1)、取扱説明書(1)、フェイスシールド(20)	USBタイプCケーブル(1)
	L380/L380B	本体(1)、顔の皮膚(1)、バッグ(1)、ジャケット(1)、肺ビニール袋(1)、取扱説明書(1)、フェイスシールド(20)	USBタイプCケーブル(1)

消耗品/アクセサリ

※別途購入が可能

リモコン 	ジャケット 	肺ビニール袋 	ハートビート 	マット兼用バッグ 	マネクリン 
胴体の皮膚 	胴胸骨 	フェイスシールド 	フェイスシールド (50枚) 	大人用のスプリング 	小児用スプリング 



L390B / P400 心肺蘇生訓練用のマネキン

心肺蘇生法の品質に対する専用アプリケーション(APP)を通じ、リアルタイムのフィードバック/モニタリングを提供します。


Nurugo Link

■ **NURUGO Link** – 多数の受講者が行う心肺蘇生法の質をリアルタイムでモニタリングし、評価および記録管理をサポート


- 1台のデバイスにBluetoothで最大6台のマネキンが接続可能
- 最大50台のマネキンが同時接続 – 別途の機器(Multi-Link)
- AHA、KACPRのガイドラインを適用
- 胸骨圧迫(深さ/速度/リリース/姿勢)、呼吸量/速度のフィードバック
- 圧迫中断時間のフィードバック
- 心肺蘇生法の質の結果をSNSおよびPDFで出力(グラフ)
- 様々な分析情報の評価及び記録管理
- 教育完了後、機関独自の認証書を発行(PDF、プリント)
- 個別教育、小規模教育、大規模団体教育に活用
- 多様なコンテンツ形式の教育で、受講者の興味を誘導



圧力および呼吸フィードバックUI

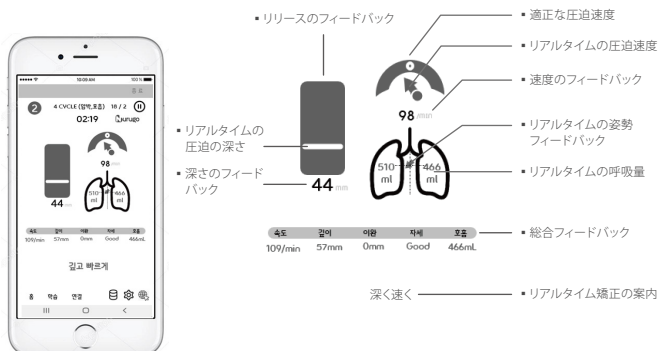


グラフのUI

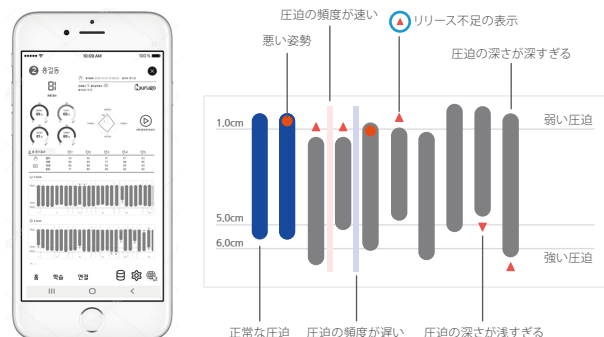


リアルタイムのフィードバック



評価および記録管理 – 成績表/ 認定書の印刷またはPDFに保存

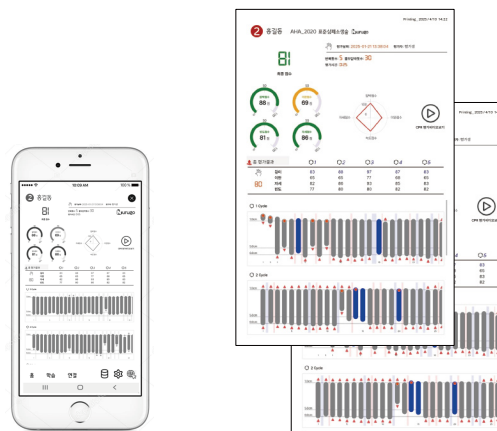


6台同時接続のモニタリング

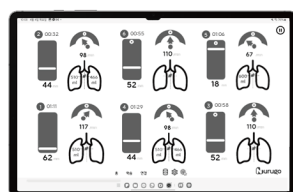


Nurugo Multi-Link

■ **NURUGO Multi-Link** – 最大50台のマネキンを同時に接続し、リアルタイムでフィードバック／モニタリングが可能な教育システム

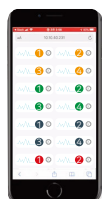

**データの損失がなく、リアルタイムでフィードバックを送信
遅延のないフィードバック**

- 言語の変更、スコア計算の設定、周期の設定、人工呼吸、胸骨圧迫など
- 専門教育設定のミッションモード
(各セクションのミッションをクリアするプロセス)
- 映像を活用した統合トレーニング実習
- ゲームモード(興味／参加／教育の拡大)
- 複数のマネキンを簡単に見つける機能(サウンド、LED)
- 受講者が理解しやすく、効果的に習得できるプロセスシステムを運営

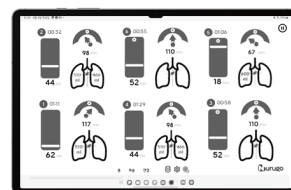

規格および構成

規格	モデル名	重量 (電池は含まれていません)	電源	構成
スマート CPR型	L390B	3.5kg	単1形1.5V(4本) または USBタイプ Cポート (兼用)	■ L380の基本機能 ■ Nurugoアプリの機能 1. ユーザー所有のiOS / Androidベースのスマートデバイスを通じてフィードバックを提供 2. 韓国語のほか、英語、ドイツ語、スペイン語、フランス語など合計10カ国語に対応 3. 圧迫の速度、圧迫の回数、リリースの有無、呼吸の速度、呼吸の回数などの評価基準を選択し、ユーザーに合わせた評価基準の設定が可能 4. 呼吸量の測定が可能 5. 胸骨圧迫の中断時間の記録が可能 6. 複数のデバイスを接続し、同時に複数の受講者へのフィードバックが可能 7. 教育中に測定したデータをグラフや評価表の形で保存が可能 8. PDFファイルなどの形で教育結果のデータを抽出およびプリント・SNSの配信が可能 9. データの損失がなく、リアルタイムでフィードバックを送信して遅延(Delay)のないフィードバック 10. 教育を修了した受講者に対して機関独自の認定証の発行が可能
	P400	3.5kg		■ L390Bの基本機能 ■ パッドの装着有無を感知し、正確にパッドを装着する訓練が可能 (当社専用の教育用AEDと連動)

構成品

規格	モデル名	基本構成品	追加構成品
スマート CPR型	L390B /P400	本体(1)、顔の皮膚(1)、バッグ(1)、ジャケット(1)、肺ビニール袋(1)、取扱説明書(1)、フェイスシールド(20)	USBタイプCケーブル(1)

CPR SAM

샘
CPR Training System®
SAM TS

CPR SAM トレーニングシステム SAM TS(TRAINING SYSTEM)

講師なしでも一人で心肺蘇生法(CPR)を簡単に学べるように作られた CPRトレーニングシステム自律学習型のCPRトレーニングシステムで、楽しくて簡単に学べるCPR教育システム

製品の特徴



SAM TS 22
(21.5インチのタッチスクリーン)

SAM TS 43
(43インチのタッチスクリーン)

SAM TS 55
(55インチのタッチスクリーン)

自律学習型の CPRトレーニングシステム

CPRの理論・訓練・評価が可能なトレーニングシステム



規格および構成

品名	心肺蘇生法 SAMトレーニングシステム (CPR SAM TS)			規格	CPRの理論・訓練・評価が可能なトレーニングシステム
特徴	▪ キオスク型のタッチスクリーンを通じて手軽に楽しく体験／実習を! ▪ 専門教育映像とNurugoマネキンの音声案内に従って簡単に体験! ▪ CPR映像を見る/体験する/評価する/ゲーム機能 ▪ 評価 - 1セット30回の心肺蘇生法/ 2セット60回の心肺蘇生法 ▪ ゲームする:シングルモード／対決モード／ランキングを表示する機能 ▪ カスタマイズされたコンテンツの開発 - 各需要先(企業、行政機関、その他)の映像広告及び各種お知らせコンテンツの登録!				
外形／重量	全体	SAM TS 22	幅795mm × 奥行910mm × 高さ最大1,600mm / 35.5kg		
		SAM TS 43	幅640mm × 奥行860mm × 高さ1,885mm / 64kg		
		SAM TS 55	幅790mm × 奥行860mm × 高さ2,010mm / 85kg		
構成品	SAM TS 22		21.5インチのタッチスクリーン(1)、マネキン台(1)、Bluetoothマネキン(1)、モニタースタンド(1)、フォーマックス(1)		
	SAM TS 43		43インチのキオスク本体(1)、マネキン台(1)、Bluetoothマネキン(1)		
	SAM TS 55		55インチのキオスク本体(1)、マネキン台(1)、Bluetoothマネキン(1)		
素材	TS 43、TS 55:キオスク型(スチール)／TS 22:キオスク型(スチール)、フォーマックス				

心肺蘇生法(CPR)の体験館(体験／ブースの施工事例)



製品 名称 説明

Brand Channel

ホームページ Homepage


www.BESTCPR.jp



※ QRコードをスキャンすると、公式ホームページへ移動します。

Shopping Mall


www.BESTCPRMALL.co.kr

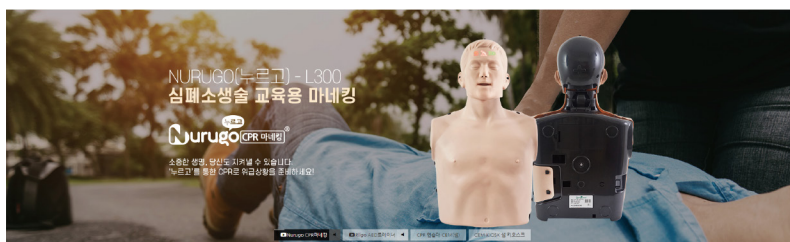

※ QRコードをスキャンすると、公式ホームページへ移動します。

YouTube

www.YOUTUBE.com/@bestcpr-official

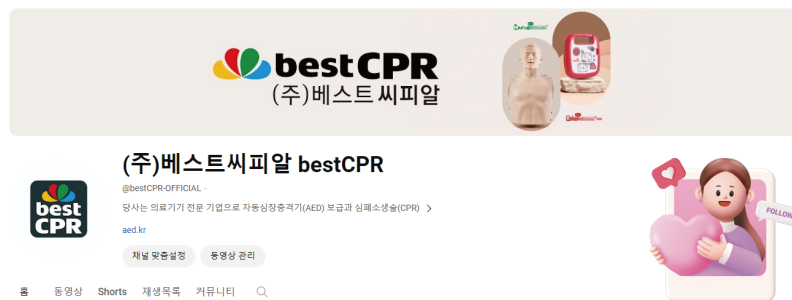

※QRコードをスキャンすると公式YouTubeチャンネルに直接移動します。

♥「チャンネル登録」と「いいね」は愛です。

Instagram

www.INSTAGRAM.com/best_cpr



best_cpr

베스트씨피알
(주)베스트씨피알 공식 인스타그램 입니다. #자동심장충격기 #aed #심폐소생술 #알리고 #누르고
당사는 의료기기 전문 기업으로 자동심장충격기(AED) 보급과 심폐소생술(CPR)
교육장비의 개발 및 심폐소생술 교육활동에 전념하고 있는 '주식회사 베스트씨피알' 입니다.
📍 www.aed.kr

※ QRコードをスキャンすると、公式ホームページへ移動します。





製造および販売

bestCPR,inc.

www.BESTCPR.JP

本社／工場

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
(〒10090) 京畿道 金浦市 テジャン路 741、
キョンドンミルウェルシティ 273号～277号
Tel : +82-31-385-7272 Fax : +82-31-385-3999

事務所

(〒10090) 京畿道 金浦市 テジャン路 741、
キョンドンミルウェルシティ 634号～636号
Tel : +82-2-3211-3000 Fax : +82-2-706-4224

企業附属研究所

(〒18469) 京畿道 華城市 トンタンキフン路 560、
ドンイクミラベルタワー 1001号～1002号
Tel : +82-70-4808-2487



本カタログの製品は、品質向上のため、予告なく仕様および色
が変更される場合があります。本カタログの著作権は、(株)ベストCPR
に帰属し、当社の同意なしに内容が無断使用すること
を禁じます。本カタログの無断使用によって生じるいかなる結果に対しても
法的責任を負いません。

© 2025 bestCPR, Inc. All rights reserved.

Ver. 2025